



Kiilto Pro Surface Des wipes 12 st (med tensid)

Ytdesinfektionsservett



Kiilto Pro Surface Des wipes med tensid består av mjuka följsamma servetter av hög kvalitet, som är lätta att arbeta med. Servetterna desinficerar effektivt samtidigt som de rengör ytan med tillsatsen av tensid.

Produkten består av ca 75 vol% denaturerad etanol samt tensid som rengör ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN16615 (baktericidal effekt) 1 min

EN14348 (M. Avium) 1min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN 16615 (jästicidal effekt) 1min

EN 13624 (fungicidal effekt) 15 min

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

| | |
|--------------------------|--|
| Användningsområde | Passar för desinfektion av större ytor, som t.ex. patientsängar, bord, köksbänkar, toaletter etc. |
| Produktegenskaper | Servetten har en tjock, god kvalitet och är 240 x 350mm Mängden vätska per förpackning - 405 ml En servett räcker till en hel patientsäng eller ca 6-10 m2 12 stora dukar i en återförslutningsbar förpackning |
| Bruksanvisning | Gör så här <ul style="list-style-type: none">• Tag en desinfektionsservett på torr yta• Bearbeta ytan upprepade gånger (se förpackningen för kontakttider)• Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka |
| Förvaring | Förvaras i rumstemperatur. Stäng alltid förpackningen mellan användningarna för att garantera fuktiga servetter. |
| Tillverkningsland | FRANKRIKE |

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

12 x 1 st

603064

7054956030645

7054957030644



Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.